



Infinity tiene el agrado de presentar un NUEVO conjunto de bolsa de 500 ml para usar con la bomba de alimentación entérica Infinity. Este nuevo conjunto, cuyo código para pedidos es **INF0500-E**, viene **SOLO** con el conector ENFit y es para uso específico con sondas de alimentación entérica compatibles con ENFit. El conjunto de bolsa de 500 ml existente, cuyo código para pedidos es **INF0500-A**, sigue estando a la venta y continuará incluyendo el sistema de conector ENFit **ADEMÁS DE** un conector escalonado de transición.



EXISTENTE INF0500-A

Conjunto de administración para bomba de alimentación entérica, de 500 ml, con sistema de conector ENFit y conector escalonado de transición

Unidad de medida: caja
 Cantidad/caja: 30 unidades



NUEVO INF0500-E

Conjunto de administración para bomba de alimentación entérica, de 500 ml, con conector ENFit

Unidad de medida: caja
 Cantidad/caja: 30 unidades



Si tiene preguntas relacionadas con la bomba o necesita ayuda para solucionar problemas, hable en vivo con un representante clínico de Moog, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Asistencia clínica y al cliente **800.970.2337**
 Visite infinityfeedingpump.com para obtener más información.


ENFit[®] es una marca comercial registrada de GEDSA
 Infinity[®] es una marca comercial registrada de ZeveX, Inc.
 Moog[®] es una marca comercial registrada de Moog, Inc.
 © 2020 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 ZeveX Park Lane,
 Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-81004-002 Rev. A

MOOG[®]
 Enhancing Healthcare.
 Enriching Lives.[™]


Instrucciones de consulta rápida para INF0500-E

Estas instrucciones no reemplazan las instrucciones de uso. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones de uso del conjunto INF0500-E y el manual del operador de la bomba de alimentación entérica Infinity antes de utilizar la bomba.


Si usa una mochila

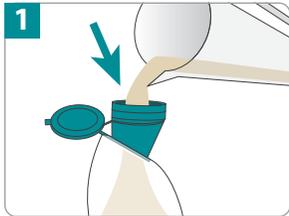


1 Sostenga el embudo de la bolsa en forma vertical y vierta la fórmula de alimentación. Cierre bien la tapa.

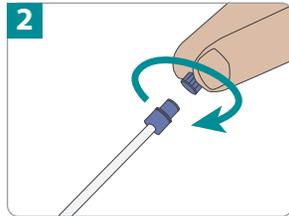


2 Desenrosque la tapa protectora del conector ENFit girándola hacia la izquierda.

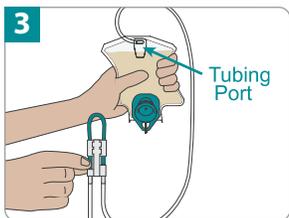

3 **Cebe el conjunto manualmente y elimine el aire** volteando la bolsa boca abajo e inclinándola para mantener el aire en el orificio de la sonda. Apriete suavemente el tubo de color verde azulado debajo del símbolo "O". Al mismo tiempo que aprieta el tubo, apriete también suavemente la bolsa para facilitar el movimiento del líquido. Mantenga esta posición hasta que la fórmula llegue al conector de la sonda de alimentación.

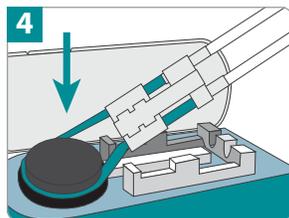

4 Enlace el tubo de silicona alrededor de la rueda de la bomba y estírelo levemente. Asiente el cartucho dentro de la bomba y cierre la puerta.

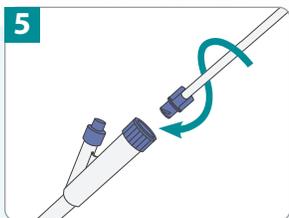


5 Enrosque el conector ENFit en la sonda de alimentación girándolo hacia la derecha firmemente con la mano. Tenga cuidado de no apretarlo en exceso.




6 Coloque la bomba dentro de la mochila y sujétela con las correas.


Si usa un portasuero

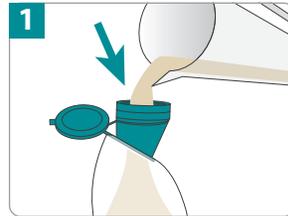

1 Sostenga el embudo de la bolsa en forma vertical y vierta la fórmula de alimentación. Cierre bien la tapa y cuelgue la bolsa.

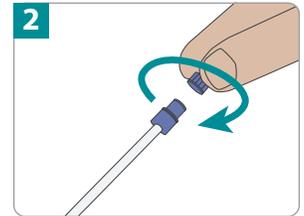


2 Desenrosque la tapa protectora del conector ENFit girándola hacia la izquierda.

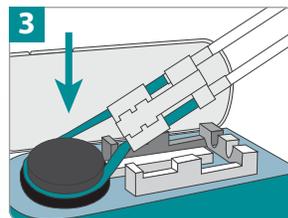


3 **Si va a realizar el cebado manualmente, avance al paso 6. Si va a usar la bomba para el cebado, continúe con el paso 5.**

Enlace el tubo de silicona alrededor de la rueda de la bomba y estírelo levemente. Asiente el cartucho dentro de la bomba y cierre la puerta.

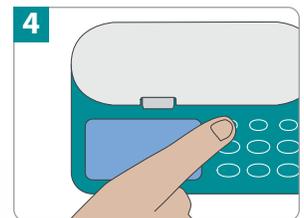


4 Encienda la bomba manteniendo presionada la tecla **ON/OFF** (encendido/apagado) hasta que la bomba emita un pitido.

Luego, mantenga presionada la tecla **PRIME** (cebar) hasta que la fórmula llegue al conector de la sonda de alimentación.

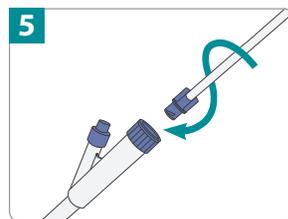

5 Enrosque el conector ENFit en la sonda de alimentación girándolo hacia la derecha firmemente con la mano. Tenga cuidado de no apretarlo en exceso.

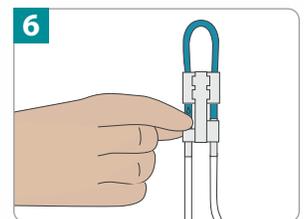

6 **Para realizar el cebado manualmente,** gapriete suavemente el tubo de color verde azulado debajo del símbolo "O". Al mismo tiempo que aprieta el tubo, apriete también suavemente la bolsa para facilitar el movimiento del líquido. Mantenga esta posición hasta que la fórmula llegue al conector de la sonda de alimentación.

Cuando finalice el cebado, consulte los pasos 3 y 4 para cargar el conjunto en la bomba y conectarlo a la sonda de alimentación.



Si tiene preguntas relacionadas con la bomba o necesita ayuda para solucionar problemas, hable en vivo con un representante clínico de Moog, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Asistencia clínica y al cliente **800.970.2337**
Visite infinityfeedingpump.com para obtener más información.